

Инструкция по эксплуатации

Персональный алкотестер

SITITEK PRO2




www.kupitalkotester.ru

Содержание

Схема устройства.....	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация.....	4
Установка батарей.....	5
Эксплуатация.....	5
Рекомендации по использованию алкотестера SITITEK PRO2.....	6
Гарантия и сервис.....	6

www.kupri-alkotester.ru

Схема устройства

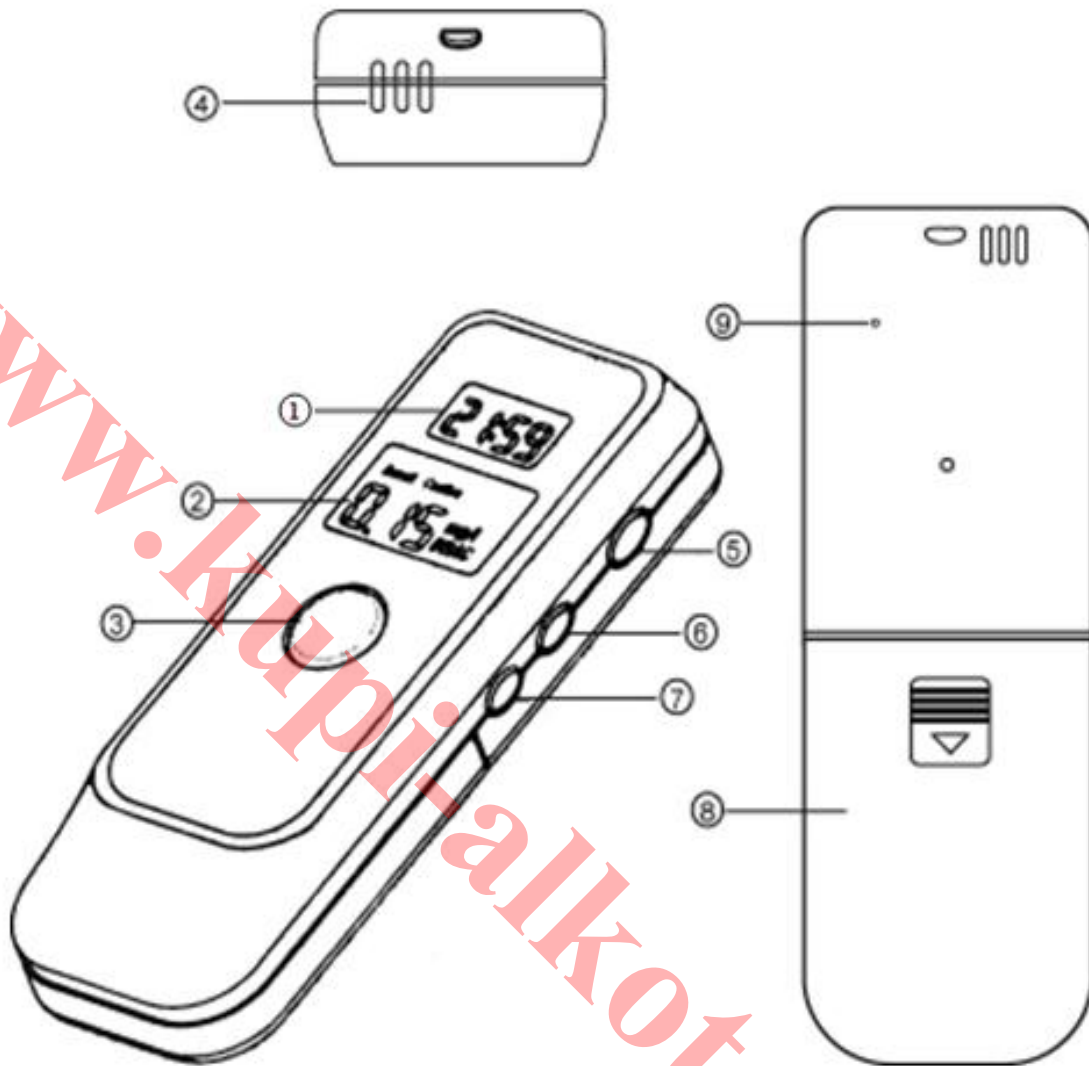

1. Экран часов
2. Экран алкотестера
3. Кнопка включения (POWER)
4. Отверстие для вдыхания
5. Кнопка выбора режима (MODE)
6. Кнопка установки (SET)
7. Кнопка регулировки (ADJ)
8. Отделение для батарей
9. Кнопка сброса (RESET)

Технические характеристики


Способ продувания	бесконтактный
Тип сенсора	полупроводниковый оксидный
Калибровка сенсора	примерно через 10000 тестов (раз в три года)
Дисплей	двойной LCD-дисплей
Единицы измерения	г/л и % ВАС
Диапазон измерений	0,0...1,9 г/л 0,00...0,19 % ВАС
Точность измерений	0,1 г/л 0,01 % ВАС
Максимальное число измерений в день	не больше 5
Время:	
- продувания	3-5 сек.
- установки показаний	не более 2 сек.
- подготовки к следующему тесту (очистки датчика)	не более 1 мин.
Функция автоотключения	есть (через 15 секунд после тестирования)
Дополнительные функции	часы (12/24), термометр (°C или °F), будильник, таймер
Источник питания:	
- алкотестер	2 щелочные батарейки ААА-типа (1,5 В)
- часы, будильник, таймер, термометр	1 батарейка АG13
Длительность работы от одного комплекта батарей	200 измерений
Индикатор заряда	есть
Размеры/ Вес	100 x 37 x 17 мм/45 г

Комплектация

- Алкотестер SITITEK PRO2.
- Ремешок на руку.
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.

Установка батарей

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте две батареи AAA соблюдая полярность.
3. Удалите защитную пленку для активации 1,5 В батареи питающие часы.
4. Закройте крышку.

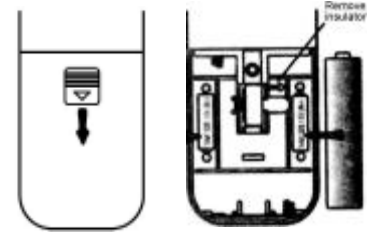


Эксплуатация

Прогревание

1. Нажмите кнопку питания 1 раз.
2. На экране появится символ «Прогревание» («warm») и начнется обратный отсчет от 9 до 0.


Обратите внимание!

- Если первое прогревание будет прервано, алкотестер перезагрузится автоматически и начнет прогревание заново.
- После длительного неиспользования прибора, повторите процедуру прогрева несколько раз.

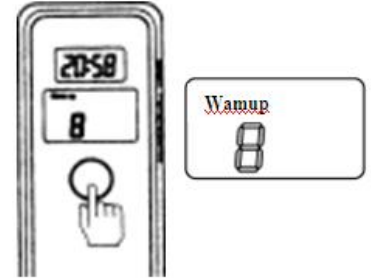

Тест

1. Символ «Дышите» («blow») появится на дисплее когда отсчет от 9 до 0 закончен.
2. Это значит, что устройство готово к использованию.
3. Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие 3-5 секунд. На экране появится результат.
4. Символ «Осторожно» («Caution») появляется, когда концентрация алкоголя низкая.
5. Символ «Опасно» («Danger») появляется, когда концентрация алкоголя высокая.

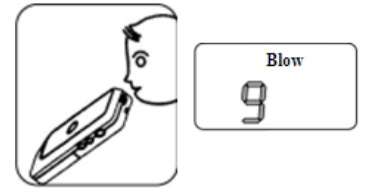

Автовыключение устройства

1. После вывода результатов теста, устройство выключится автоматически через 15 секунд.
2. При прерывании прогрева устройства, также происходит автовыключение. Если не дуть в устройство в режиме «TEST», устройство покажет 0.00.

Внимание!

Для достижения более точных результатов, рекомендуется повторить тест 2-3 раза.

Индикация низкого заряда батареи

Символ «L» обозначает низкий заряд батареи, устройство автоматически отключится.

Настройка часов

1. Нажмите кнопку «ADJ» для установки 12 или 24 часового формата.
2. Нажмите и удерживайте «SET» в течение 2 секунд для входа в настройку времени, нажмите «ADJ» для регулировки.
3. Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.
4. Нажмите «SET» для подтверждения.

Будильник:

1. В режиме фактического времени нажмите «MODE» для перехода в режим будильника.
2. Нажмите «ADJ» для включения и выключения будильника.
3. Нажмите и удерживайте «SET» в течение 2 секунд для входа в настройку времени, нажмите «ADJ» для регулировки.
4. Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.
5. Нажмите «SET» для подтверждения.

Термометр:


1. В режиме фактического времени нажмите дважды «MODE» для перехода в режим термометра.
2. Нажмите «ADJ» для выбора единиц измерения С или F.

Таймер обратного отсчета:

1. В режиме фактического времени нажмите трижды «MODE» для перехода в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте «SET» в течении 2 секунд для входа в настройку времени, нажмите «ADJ» для регулировки.
3. Нажмите «SET» еще раз для установки минут, нажмите «ADJ» для регулировки.
4. Нажмите «SET» для подтверждения.
5. Нажмите «ADJ» для начала отсчета и еще раз для остановки.
6. Когда таймер дойдет до 0 прозвучит сигнал.

Сброс заводских настроек:

Для сброса всех настроек до заводских, нажмите кнопку сброса тупым тонким стержнем.

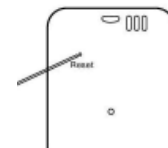

Рекомендации по использованию алкотестера SITITEK PRO2

Для получения максимально точных результатов измерений специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

- Проверку лучше проводить, как минимум через 3 минуты после курения и через 15 минут после приема алкоголя.
- Не повторять тесты менее чем через 3 минуты.
- Не проводите тестирование при сильном ветре или в помещении с сильно загрязненной атмосферой.
- Не вливайте жидкость в дыхательную трубку
- Не забывайте периодически калибровать или заменять чувствительный сенсор алкотестера.
- Храните прибор вдали от нагревательных приборов и/или источников сильных запахов (парфюмерия, косметика).
- Производитель не несет юридической ответственности за результаты тестов.

Гарантия и сервис

Срок гарантии: 1 год.

Срок хранения: не ограничен.

Произведено: DoLink Industrial Co., Ltd

по эксклюзивному заказу ООО «СИТИТЕК» (SITITEK), Россия

Адрес производства: Room 823-828, Dongming Mansion, Minkang Road, Longhua Town, Bao'an District, Shenzhen. China.

Официальный импортер в России и странах СНГ: ООО «СИТИТЕК»

Юридический адрес импортера: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу:

426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2

Бесплатный телефон для жителей РФ: 8-800-555-40-78

www.sititek.ru